

KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU

StarLink Mini
Uzaktan Mikrofonu

Eşleştirme

Mini Uzaktan Mikrofon, Neuro Processor ve Thrive platformundaki uyumlu 2.4 GHz işitme cihazlarıyla etkileşim kurmak için eşleştirilmelidir. Eşleştirme bir kez yapılır, ardından işitme cihazları ve Mini Uzaktan Mikrofon otomatik olarak birbirini tanır. Mini Uzaktan Mikrofon, fitting yazılımı için veya fitting yazılımı dışında eşleştirilebilir.

Pro Fit için eşleştirme

- 1 Pro Fit uygulamasını başlatın ve işitme cihazlarını bağlayın.
- 2 Pro Fit'teki **Hazırlık Oturumundan** veya **Açılır Menüden Aksesuarları** ☰ seçin.
- 3 Mini Uzaktan Mikrofonun açık olduğundan emin olun.
- 4 İşitme cihazlarını Mini Uzaktan Mikrofonun 15 cm yakınına yerleştirin.
- 5 Güç düğmesine çift tıklayarak Mini Uzaktan Mikrofonu eşleştirme moduna alın. LED durum göstergesi dönüşümlü olarak mavi ve kırmızı yanıp sönecektir.
- 6 İşitme cihazlarını eşleştirme moduna almak için seçin. +
- 7 Aksesuar ekranında Mini Uzaktan Mikrofon görüntüsünü görüntülendiğinde eşleştirme başarılıdır.
- 8 Akış Aksesuarları kutusunun üzerindeki açılır menüyü kullanarak "Akış Sırasında İşitme Cihazı Mikrofonu" nu ayarlayın.
- 9 Akış sesini optimize etmek için Mini Uzaktan Mikrofonun altındaki açılır menüyü kullanın. Seçenekler şunlardır: Eşleştirme (varsayılan), Tiz Artırma, Bas Artırma ve Genel Artırma.
- 10 Gerekirse eşleştirme talimatları için **eşleştirme bilgilerini** seçin.




Açma

Güç düğmesine üç saniye basılı tutun ve LED yandığında bırakın.



Kapatma

Güç düğmesine iki saniye basılı tutun ve LED söndüğünde bırakın.

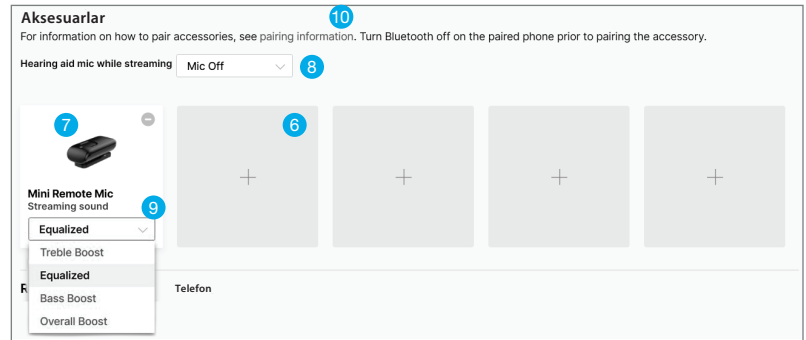

Eşleştirme (Devamı)

Mini Uzaktan Mikrofon, Thrive platformunda uyumlu 2.4 GHz iletme cihazlarıyla etkileşim kurabilmesi için eşleştirilmelidir. Eşleştirme bir kez yapılır, ardından iletme cihazları ve Mini Uzaktan Mikrofon otomatik olarak birbirini tanır. Mini Uzaktan mikrofon, Inspire X içinde veya dışında eşleştirilebilir.

Inspire X için eşleştirme

- 1 Inspire X'i başlatın, iletme cihazlarını bağlayın ve algılayın.
- 2 Sol gezinme çubuğunda **Aksesuarlar**'ı seçin.
- 3 Mini Uzaktan Mikrofon'un açık olduğundan emin olun.
- 4 İletme cihazlarını Mini Uzaktan Mikrofon'un altı inç yakınına yerleştirin.
- 5 Güç düğmesine çift tıklayarak Mini Uzaktan Mikrofon'u eşleştirme moduna alın. LED durum göstergesi dönüşümlü olarak mavi ve kırmızı yanıp sönecektir.
- 6 İletme cihazlarını eşleştirme moduna almak için **Eşleştir**'i seçin. (A)
- 7 Mini Uzaktan Mikrofon görüntüsü aksesuar ekranında görüntülendiğinde eşleştirme başarılıdır. (B)
- 8 Akış Aksesuarları kutusunun altındaki açılır menüyü kullanarak "Akış Sırasında İletme Cihazı Mikrofonu" seçeneğini ayarlayın. (C)
- 9 Gerekirse eşleştirme talimatları için Bilgi simgesini seçin. (D)




Açma

Güç düğmesine üç saniye basılı tutun ve LED yandığında bırakın.



Kapatma


Güç düğmesine iki saniye basılı tutun ve LED söndüğünde bırakın.

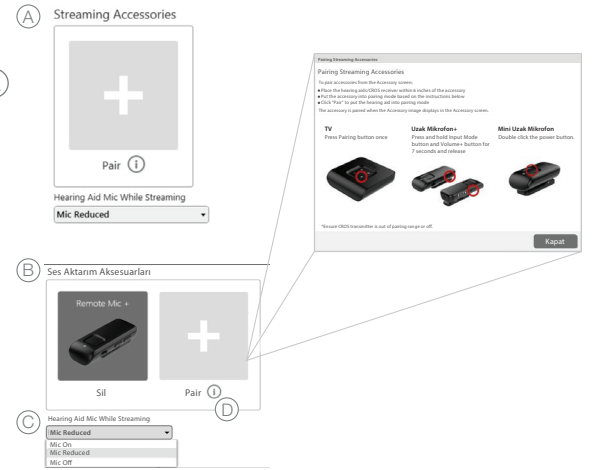

Yazılım Dışında Eşleştirme


- 1 İletme cihazlarıyla önceden eşleştirilmiş olan tüm cep telefonlarını veya diğer aksesuarları kapatın.
- 2 Mini Uzaktan Mikrofonun açık olduğundan emin olun.
- 3 Eşleştirme moduna almak için iletme cihazlarını kapatın ve ardından tekrar açın.
- 4 İletme cihazlarını Mini Uzaktan Mikrofonun altı inç (yaklaşık 15 cm) yakınına yerleştirin.

- 5 Güç düğmesine çift tıklayarak Mini Uzaktan Mikrofonu eşleştirme moduna alın. LED durum göstergesi mavi ve kırmızı renkte dönüşümlü olarak yanıp sönecektir.

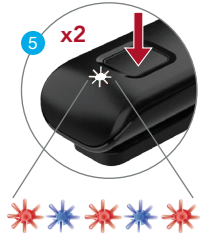

- 6 Başarılı bir eşleştirmeyi onaylamak için her iletme cihazı için yeşil bir LED yanı sönecektir.


Nasıl Çalışır?

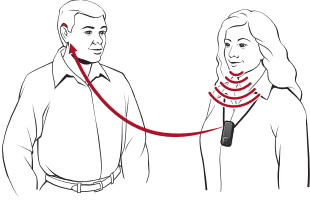

Mini Uzaktan Mikrofon işitme cihazı kullanan kişinin arka plan gürültüsü olduğunda tek bir konuşmacıya odaklanmasını sağlar. Masaüstü kullanım

için genel amaçlı çok yönlü bir mikrofon olarak optimize edilmemiş olsa da, Mini Uzaktan Mikrofon televizyon izleme için de fayda sağlayabilir.

Televizyon hoparlörlerinin yakınına Mini Uzaktan Mikrofonu yerleştirin. Rahat bir dinleme seviyesi elde etmek için, Mini Uzaktan Mikrofonun televizyon hoparlörlerinden uzaklığını ayarlayın veya ses akışı ses seviyesini değiştirin.

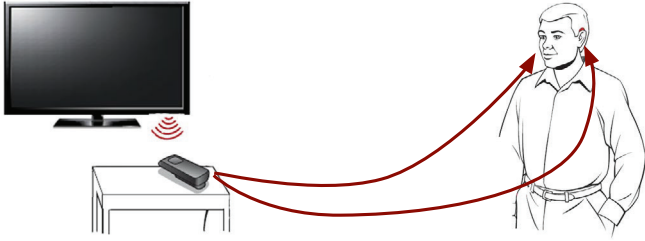

Mini Uzaktan Mikrofon'dan ses akışı başlatmak için:


- 1 Güç düğmesine üç saniye basarak Mini Uzaktan Mikrofon'un açık olduğundan emin olun.
- 2 Ses akışı işitme cihazlarında otomatik olarak başlar.
- 3 İşlem bittiğinde, akışı durdurmak için Mini Uzaktan Mikrofon'u kapatın.

Ses akışı şu durumlarda duracaktır:

- Mini Uzaktan Mikrofon kapatıldığında.
- Doğrudan cep telefonu üzerinden işitme cihazlarına bir telefon görüşmesi alındığında. Telefon görüşmesi bittikten sonra tüm akış durur. İstenirse, Mini Uzaktan Mikrofon akışının manuel olarak yeniden başlatılması gerekecektir.
- Kullanıcı Mini Uzaktan Mikrofon'un menzilinden çıkarsa (65 fit veya 20 metreye kadar), akış durur ve manuel olarak yeniden başlatılması gerekir.

Kullanım

- Mini Uzaktan Mikrofon, Thrive platformunda bir adet 2.4 GHz işitme cihazıyla eşleştirilebilir.
- Mini Uzaktan Mikrofon, giysilere takılabilir veya kordonla taşınabilir.
- Mini Uzaktan Mikrofonun çalışma menzili 65 fit veya 20 metreye kadardır.
- En iyi sonuçlar için Mini Uzaktan Mikrofonu ses kaynağına yakın yerleştirin. Mini Uzaktan Mikrofon, konuşmacının ağzından sekiz inç (20 cm) mesafede olmalıdır.
- Mini Uzaktan Mikrofon, tam şarjla 10 saate kadar akış yapabilir.

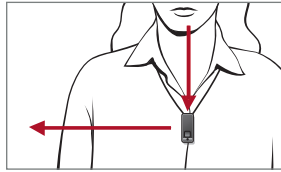

- Mini Uzaktan Mikrofon, üç saatten kısa sürede tam şarj olur ve yaklaşık bir saatte 50% şarj seviyesine ulaşabilir.
- Mini Uzaktan Mikrofon pili azaldığında, LED durum göstergesi yavaşça kırmızı renkte yapıp söner ve işitme cihazlarında her beş dakikada bir sesli bir uyarı sesi duyulur.
- Mini Uzaktan Mikrofon düşürüldüğünde kısa süreliğine sessize alınır ve cihaz sabitlendiğinde akışa devam eder.
- İşitme cihazı kullanıcı kontrolleri, 2.4 GHz Uzaktan Kumanda, işitme cihazı mobil uygulaması veya Mini Uzaktan Mikrofonu açıp kapatarak akışı manuel olarak Başlat/Durdurabilirsiniz.
- Akış Sesi, işitme cihazı mobil uygulaması, 2.4GHz Uzaktan Kumanda veya işitme cihazı kullanıcı kontrolleri aracılığıyla ayarlanabilir.