

KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU

StarLink Uzak Mikrofon+




Eşleştirme

Uzaktan Mikrofon+'ın, Neuro Processor ve Thrive platformlarındaki uyumlu 2.4GHz işitme cihazlarıyla etkileşim kurabilmesi için eşleştirilmesi gerekir. Eşleştirme bir kez yapılır, ardından işitme cihazları ve Uzaktan Mikrofon+ otomatik olarak birbirlerini tanır. Uzaktan Mikrofon+, fitting yazılımı içinde veya fitting yazılımının dışında eşleştirilebilir. Uzaktan Mikrofon+, sekiz adede kadar Bluetooth® cihazıyla eşleştirilebilir.*

Pro Fit İçinde Eşleştirme Accessories


- 1 Pro Fit uygulamasını başlatın ve işitme cihazlarını bağlayın.
- 2 Pro Fit'teki Hazırlık Oturumundan veya Açılır Menüden Aksesuarları ≡ seçin.
- 3 Uzaktan Mikrofon+'ın açık olduğundan emin olun.
- 4 İşitme cihazlarını Uzaktan Mikrofon+'ın altı inç yakınına yerleştirin.
- 5 LED durum göstergesi dönüşümlü olarak mavi ve kırmızı yanıp sönene kadar Giriş Modu ve Ses Açma düğmelerine aynı anda basarak Uzaktan Mikrofon+'ı eşleştirme moduna alın.
- 6 İşitme cihazlarını eşleştirme moduna almak için seçin. +
- 7 Aksesuar ekranında Uzaktan Mikrofon+ görüntüsü görüldüğünde eşleştirme başarılıdır.
- 8 Akış aksesuarları kutusunun üzerindeki açılır menüyü kullanarak "Akış Sırasında İşitme Cihazı Mikrofonu" nu ayarlayın.
- 9 Akış sesini optimize etmek için Uzaktan Mikrofon+'ın altındaki açılır menüyü kullanın. Seçenekler Eşitlenmiş (varsayılan), Tiz Artırma, Bas Artırma ve Genel Artırma'dır.
- 10 Gerekirse eşleştirme talimatları için **eşleştirme bilgilerini** seçin.

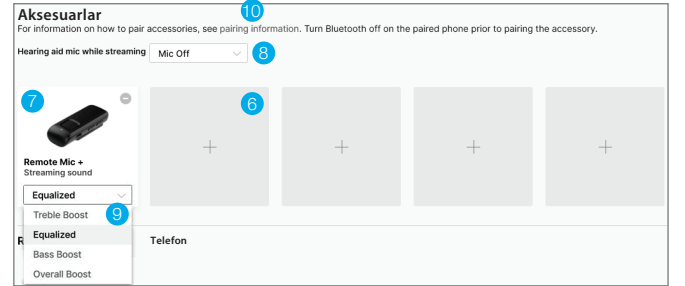

Eşleştirme (Devamı)

Inspire X için eşleştirme

- 1 Inspire X'i başlatın, işitme cihazlarını bağlayın ve algılayın.
- 2 Sol gezinme çubuğunda **Aksesuarlar**'ı seçin.
- 3 Uzaktan Mikrofon+'ın açık olduğundan emin olun.
- 4 İşitme cihazlarını Uzaktan Mikrofon+'nın altı inç yakınına yerleştirin.
- 5 LED durum göstergesi dönüşümlü olarak mavi ve kırmızı yanıp sönene kadar Giriş Modu ve Ses Açma düğmelerine aynı anda basarak Uzaktan Mikrofon+'yı eşleştirme moduna alın.
- 6 İşitme cihazlarını eşleştirme moduna almak için Eşleştir'i seçin. (A)
- 7 Uzaktan Mikrofon+ görüntüsü aksesuar ekranında görüntülendiğinde eşleştirme başarılıdır. (B)
- 8 Akış aksesuarları kutusunun altındaki açılır menüyü kullanarak "Akış Sırasında İşitme Cihazı Mikrofonu"nu ayarlayın. (C)
- 9 Gerekirse eşleştirme talimatları için Bilgi simgesini seçin. (D)

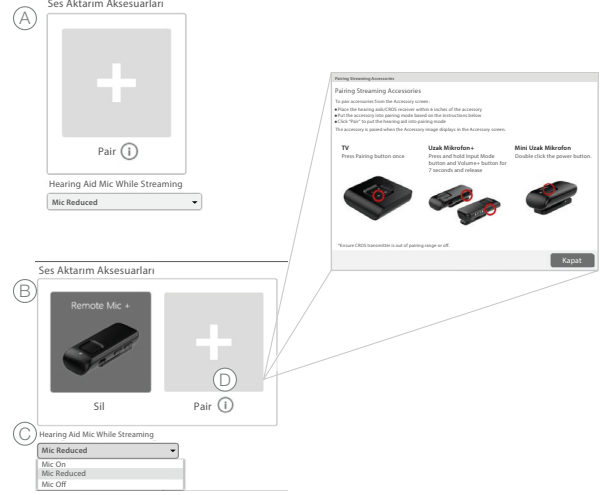

Yazılım Dışında Eşleştirme

- 1 İşitme cihazlarıyla önceden eşleştirilmiş olan tüm cep telefonlarını veya diğer aksesuarları kapatın.
- 2 Uzaktan Mikrofon+'ın açık olduğundan emin olun.
- 3 Eşleştirme moduna almak için işitme cihazlarını kapatın ve ardından tekrar açın.
- 4 İşitme cihazlarını Uzaktan Mikrofon+'ın 15 cm yakınına yerleştirin.
- 5 LED durum göstergesi dönüşümlü olarak mavi ve kırmızı yanıp sönene kadar Giriş Modu ve Ses Açma düğmelerine aynı anda yedi saniye boyunca basın.
- 6 Başarılı bir eşleştirmeyi onaylamak için her işitme cihazı için yeşil bir LED yanıp sönecektir.



Uzaktan Mikrofon+ ile Bluetooth Cihazlarını Eşleştirme


- 1 İşitme cihazlarıyla önceden eşleştirilmiş olan tüm cep telefonlarını veya diğer aksesuarları kapatın.
- 2 Uzaktan Mikrofon+'un açık olduğundan emin olun.
- 3 LED durum göstergesi hızlı bir şekilde mavi yanıp sönene kadar Giriş Modu ve Ses Kısma düğmelerine aynı anda yedi saniye boyunca basın.
- 4 Bluetooth cihazını eşleştirme moduna alın.
- 5 Uzaktan Mikrofon+ görüldüğünde, Bluetooth cihazında onu seçin.
- 6 Başarılı eşleştirme ile Uzaktan Mikrofon+ LED'i iki saniye boyunca yeşil yanacaktır.



Kullanım

- Uzaktan Mikrofonu açmak veya kapatmak için Çok Fonksiyonlu düğmeye iki saniye basılı tutun.
- Uzaktan Mikrofon+, kıyafetlere takılabilir veya kordonla taşınabilir.
- Uzaktan Mikrofon+ çalışma menzili 10 metreye kadardır. Kullanıcı Uzaktan Mikrofon+'un ses akışının menzilinden çıkarsa, akış durur ve manuel olarak yeniden başlatılması gerekir.
- Uzaktan Mikrofon+, tam şarjla 10 saate kadar akış yapabilir.
- Uzaktan Mikrofon+ üç saatte tam şarj olur.
- Uzaktan Mikrofon+'un pili azaldığında LED durumu göstergesi kırmızı renkte yanıp söner ve işitme cihazlarında her beş dakikada bir sesli uyarı sesi duyulur.

- Uzaktan Mikrofon+ düşürüldüğünde geçici olarak sesi keser ve cihaz dengelendiğinde akışa devam eder.
- Akış başlatma/durdurma işlevi ve akış ses seviyesi, Uzaktan Mikrofon+, işitme cihazı kullanıcı kontrolleri, 2.4 GHz Uzaktan Kumanda veya işitme cihazı mobil uygulaması aracılığıyla ayarlanabilir.
- Ses kaynağı Uzaktan Mikrofon+ veya telefon akışı için Bluetooth olarak ayarlandığında, Uzaktan Mikrofon+ konuşmacının ağızından sekiz inç (20 cm) mesafede olmalıdır. Uzaktan Mikrofon+ dikey konumda takmak en iyi performansı sağlar. (A)

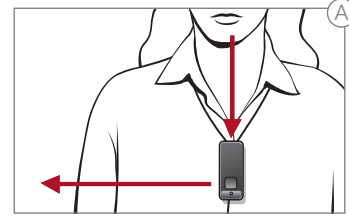

Giriş Modu

- 1 Bir sonraki kullanılabilir ses kaynağına geçmek için Giriş Modu düğmesine basın. Giriş modları arasında geçiş yaparken, FM Sistemi ve Hat Girişi seçenekleri yalnızca Uzaktan Mikrofon+ cihazına fiziksel olarak bağlıyken kullanılabilir.
- 2 Giriş Modu LED'i kapalıysa, LED'i geçici olarak yakmak için Giriş Modu düğmesine basın.
- 3 Uzaktan Mikrofon+ cihazı kapatıldığında, en son kullanılan giriş moduna hatırlayacak ve tekrar açıldığında o konuma dönecektir.





Ses Kaynağı Seçenekleri

Uzaktan Mikrofon:

Uzaktan Mikrofon+, fiziksel konumuna göre mikrofon ayarlarını otomatik olarak optimize eder. Masaüstünde kullanıldığında ses her yönden eşit olarak alınır (çok yönlü) ve vücuda takıldığında yukarıdan gelen sesi önceliklendirirken diğer yönlerden gelen sesi azaltır (yönlü).


Uzaktan Mikrofon işlevini kullanmak için:

- Uzaktan Mikrofon+'nın açık kolduğundan ve giriş modunun Mikrofon olarak ayarlandığından emin olun.
- İşitme cihazlarında akış otomatik olarak başlar.

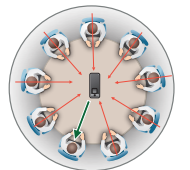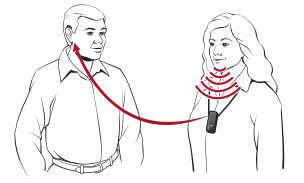

☎ Gelen/Gider Telefon Görüşmesi Akışı:

- Uzaktan Mikrofon+ cihazının açık olduğundan ve durum göstergesi LED'inin mavi yandığından emin olun.
- Giriş modu önemli değildir, çünkü bir telefon görüşmesi diğer ses giriş modlarını kesintiye uğratacaktır.
- Gelen aramayı kabul etmek için Çok Fonksiyonlu düğmeye basın.
- Giden arama için numarayı cep telefonunuzdan çevirin. Akış, işitme cihazlarında otomatik olarak başlar.

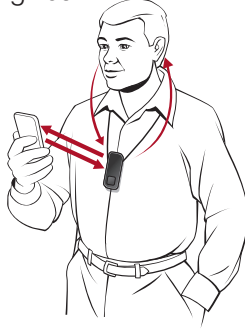

☎ Diğer Ses Akışı

- Uzaktan Mikrofon+ cihazının açık olduğundan emin olun.
- Giriş modunu Bluetooth olarak ayarlayın. Bluetooth cihazına bağlandığında LED göstergesi mavi yanacaktır.
- Bluetooth cihazınızda müzik veya diğer sesleri başlatın. Akış, işitme cihazlarında otomatik olarak başlar.



Ses Kaynağı Seçenekleri

T Döngü (Telecoil) Sistemi

Uzaktan Mikrofon+, Döngü Sistemi kullanılırken dahili bir telecoil aracılığıyla ses alabilir. Uzaktan Mikrofon+'ı dikey konumda takmak en iyi performansı sağlar.


Döngü sesini yayınlamak için:

- Uzaktan Mikrofon+'ın açık olduğundan ve giriş modunun Döngü olarak ayarlandığından emin olun.
- Akış, işitme cihazlarında otomatik olarak başlar.



FM Sistemi

- FM sistem vericisini Europin Jakına takın.
- Uzaktan Mikrofon+'ın açık olduğundan ve giriş modunun FM sistemine ayarlandığından emin olun.
- İşitme cihazı akışı otomatik olarak başlar.

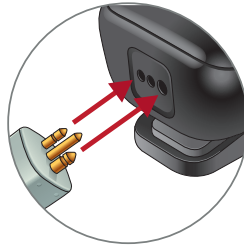


🎵 Hat Kablosu Girişi

MicroUSB Jakı aracılığıyla bir Hat Girişi kablosu takıldığında, Uzaktan Mikrofon+, Bluetooth teknolojisi kullanmayan bir cep telefonundan, MP3 çalardan, tablettten veya bilgisayardan ses alabilir.

Hat Girişi sesini aktarmak için:

- Hat Girişi kablosunu microUSB Jackına takın.
- Uzaktan Mikrofon+'ın açık olduğundan ve giriş modunun Hat Girişi olarak ayarlandığından emin olun.
- Elektronik ses kaynağınızda müzik veya başka bir ses başlatın. İşitme cihazlarınızda akış otomatik olarak başlar.

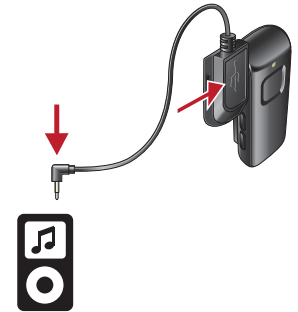

*Aksesuarlar sadece işitme cihazlarıyla eşleşir. (iPhone/app için değil).

Bluetooth® kelime işareti ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır. Bu tür işaretlerin Starkey tarafından herhangi bir şekilde kullanılması lisans altındadır. Starkey logosu, Pro Fit, Neuro Processor, Thrive, Inspire, Starkey Laboratories, Inc.'in ticari markalarıdır.

©2024 Starkey Laboratories, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

Türkiye Distribütörü

duyumedişitme™

Duyumed İşitme Cihazları A.Ş.

Fulya Mah. Büyükdere Cad. No: 74

Torun Center A Blok Ofis: 103 Şişli İstanbul

0 850 474 21 21 | info@duyumed.com | www.isitmecihazlari.com